



Cała prawda o dobrych nawykach w stomii



MIT 1A.








Przy sprzęcie dwuczęściowym okres noszenia płytki stomijnej jest długi.



FAKT:

Płytką stomijną w systemie dwuczęściowym może pozostawać na skórze nawet do 3-4 dni, jednakże jeśli podejrzewamy podciekanie, płytkę należy zmienić natychmiast. Jeśli do podciekania dochodzi często i jego ryzyko powtórzenia jest duże, płytkę można zmieniać częściej, nawet codziennie. Zawsze, gdy istnieje widoczny objaw podciekania lub ryzyko jego wystąpienia, płytkę należy zmienić natychmiast i sprawdzić stan skóry. Podciekanie nie jest widoczne, dlatego należy codziennie sprawdzać stan skóry pod przylepcem płytki stomijnej.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych dla płytki i worka w sprzęcie dwuczęściowym:

	 PŁYTKA	 WOREK
 ileostomia	co 3-4 dni; przy zwiększonym ryzyku podciekania 1 raz dziennie lub co drugi dzień	co dwa dni lub codziennie
 kolostomia	co 3-4 dni	Work zamknięty: 1 lub 2 razy dziennie Work otwarty: co 2 dni lub częściej
 urostomia	przy zwiększonym ryzyku podciekania 1 raz dziennie lub co drugi dzień	co dwa dni lub codziennie

Coloplast® EStomia

Aplikacja mobilna,
która będzie codziennie
wspierać życie
ze stomią.



Aplikacja „EStomia” zapewnia:

- Dostęp do Biblioteki wiedzy z materiałami edukacyjnymi
- Dedykowany Kalendarz Stomika
- Dostęp do porad Konsultantów i Specjalistów
- Interaktywny kontakt z Konsumentem
- Dostęp do próbek edukacyjnych



Więcej informacji pod
bezpłatnym numerem
Infolinii: 800 300 300
lub adresem email:
PL_estomia@coloplast.com

Producent i podmiot prowadzący reklamę Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa