




Cała prawda o dobrych nawykach w stomii



MIT 3A.

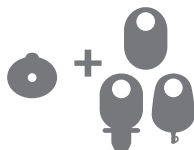






Przy sprzęcie dwuczęściowym,
wymieniam worek dopiero wtedy,
kiedy zmieniam płytkę.



FAKT:

Sprzęt dwuczęściowy został opracowany z myślą o rzadszej wymianie płytki, a nie worka stomijnego. Worek stomijny w sprzęcie dwuczęściowym nie stanowi integralnej jego części i powinien być wymieniany zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych dla każdego typu stomii. Zapewnia to jego optymalne działanie oraz higienę użytkowania.

	 PŁYTKA	 WOREK
 ileostomia	co 3-4 dni; przy zwiększonym ryzyku podciekania 1 raz dziennie lub co drugi dzień	co dwa dni lub codziennie
 kołostomia	co 3-4 dni	Worek zamknięty: 1 lub 2 razy dziennie Worek otwarty: co 2 dni lub częściej
 urostomia	przy zwiększonym ryzyku podciekania 1 raz dziennie lub co drugi dzień	co dwa dni lub codziennie

Coloplast® EStomia

Aplikacja mobilna,
która będzie codziennie
wspierać życie
ze stomią.



Aplikacja „EStomia” zapewnia:

- Dostęp do Biblioteki wiedzy z materiałami edukacyjnymi
- Dedykowany Kalendarz Stomika
- Dostęp do porad Konsultantów i Specjalistów
- Interaktywny kontakt z Konsumentem
- Dostęp do próbek edukacyjnych



Więcej informacji pod
bezpłatnym numerem
Infolinii: 800 300 300
lub adresem email:
PL_estomia@coloplast.com

Producent i podmiot prowadzący reklamę Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa

Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. www.coloplast.pl
Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym
własność Coloplast A/S. © 03/2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.
41/OC/EDU/MJG/H/P/03/2023

