

Worki do zbiórki moczu

Przewodnik dla osób z nefrostomią




Nefrostomia – co to takiego?

Budowa układu moczowego

Układ moczowy spełnia w organizmie człowieka wiele ważnych dla życia funkcji. Jego podstawowym zadaniem jest wydalanie wraz z moczem zbędnych produktów przemiany materii takich jak sole mineralne i mocznik oraz zachowanie odpowiedniego dla organizmu składu płynów ustrojowych.

W skład układu moczowego wchodzi nerki oraz drogi wyprowadzające z nich mocz: kielichy i miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Gdy z przyczyn zdrowotnych dochodzi do niewydolności i zaburzeń w odpływie moczu konieczne może być wyłonienie nefrostomii.

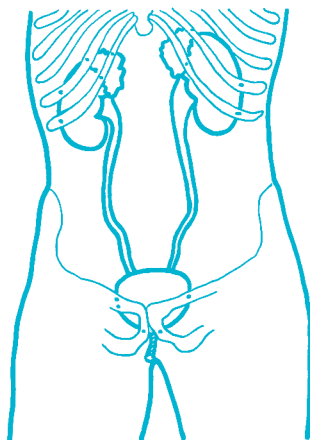


rys. 1
Budowa układu moczowego

Co to jest nefrostomia?

Nefrostomia przezsłonna (nazywana też przetoką nerkowo-skórną) to zabieg, którego celem jest zapewnienie odpływu moczu z nerki. Wykonuje się go w sterylnych warunkach sali zabiegowej, w znieczuleniu miejscowym. Celem zabiegu jest założenie do nerki specjalnego drenu nefrostomijnego. Jeden z jego końców umieszczony jest w nerce, drugi – widoczny na zewnątrz ciała – jest podłączany do worka do zbiórki moczu. Nefrostomia może zostać wyłoniona na jednej lub jednocześnie na obu nerkach (nefrostomia dwustronna).

Dren nefrostomijny ma specjalną budowę. Jego koniec nerkowy jest zwinęty na kształt spirali, aby chronić przed wysuwaniem się i wypadaniem. Perforowana końcówka pozwala na sprawne usuwanie płynu poza organizm. By zwiększyć stabilność systemu odprowadzania moczu, dren nefrostomijny zostaje wszyty w miejscu jego wyjścia na skórę. Umożliwia on odprowadzanie moczu do specjalnego woreczka. Worek może być mocowany do uda lub do łydki.

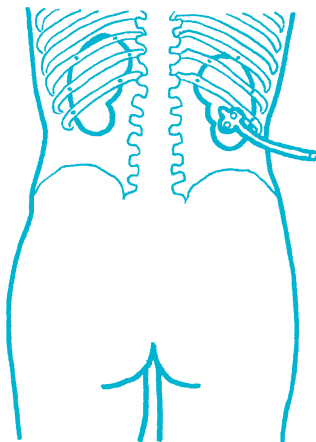

rys. 2
Umieszczenie nefrostomii

Kiedy wykonuje się nefrostomię?

Zabieg wylonienia nefrostomii wykonuje się w przypadku zaburzeń w odpływie moczu z nerki do moczowodu. Zaburzenia w odprowadzaniu moczu z nerki mogą powodować nefropatię zaporową (wodonercze), która postępując niszczy miąższ nerki prowadząc do jej niewydolności. Istnieje wiele przyczyn, które mogą wpłynąć na konieczność wylonienia nefrostomii.

Do najczęstszych należą:

- kamień moczowy w miedniczce nerkowej lub moczowodzie,
- pourazowe lub pooperacyjne uszkodzenia moczowodu,
- zwężenia moczowodu spowodowane czynnikami takimi jak zwężenie podmiedniczkowe (wrodzone lub pourazowe), jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie moczowodu, naciek nowotworowy wywodzący się z miednicy mniejszej, obecność blizn pooperacyjnych, napromienianie narządów miednicy mniejszej oraz czynniki pozapalne lub pogruźlicze.

Nefrostomia może być rozwiązaniem tymczasowym lub może być zastosowana na stałe. O tym, jaki będzie czas jej stosowania decyduje lekarz, analizując indywidualną sytuację i stan zdrowia pacjenta.

Worki do zbiórki moczu w nefrostomii

Worek do zbiórki moczu jest mocowany do zewnętrznego końca drenu nefrostomijnego i ma za zadanie w dyskretny i wygodny sposób zapewnić odprowadzanie płynu poza organizm. Jego budowa i kluczowe cechy powinny zapewniać użytkownikowi komfort oraz poczucie pełnego bezpieczeństwa.

Szeroki asortyment worków do zbiórki moczu marki Coloplast, pozwala na swobodny wybór takiego rozwiązania, które będzie w pełni odpowiadało indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Różne pojemności, różne sposoby mocowania, wygodne zawory odpływowe oraz możliwość połączenia z dodatkowymi akcesoriami, jak na przykład specjalnymi paskami na nogę, pozwalają na dostosowanie systemu nefrostomii do własnego stylu życia, podnosząc tym samym jego komfort i jakość.



rys. 3
Worek do zbiórki moczu w nefrostomii

Worki do zbiórki moczu – najważniejsze wskazówki

Worki do zbiórki moczu to bezpieczne i wygodne rozwiązanie pozwalające w pełni korzystać z codziennych aktywności. Aby móc cieszyć się każdym dniem pamiętaj o pewnych użytecznych wskazówkach.

Worki do zbiórki moczu na dzień (na nogę)

1. Worek do zbiórki moczu może być noszony zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie nogi.
2. Umocowanie worka na łydce ułatwia opróżnianie worka.
3. Większość drenów może być przycięta i w ten sposób dopasowana do indywidualnych potrzeb.
4. Niektóre z worków mają budowę wielokomorową.
5. Lekkie nawilżenie łącznika worka może ułatwić połączenie go z cewnikiem.
6. Jeśli występuje ograniczone czucie w nogach, nie należy używać pasków do worków w nocy. Lepiej w tej sytuacji położyć worek płasko na łóżku lub umocować przy łóżku za pomocą specjalnego wieszaka.


Propozycje miejsc umocowania worka do zbiórki moczu



Zewnętrzna strona łydki



Wewnętrzna strona łydki

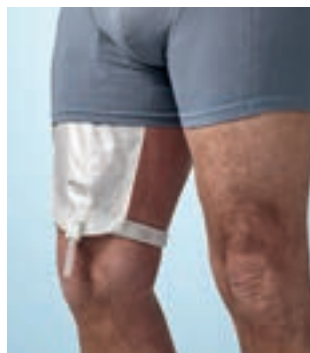

Wewnętrzna strona uda

Worki do zbiórki moczu na noc

1. Worek na noc powinien być umiejscowiony poniżej pęcherza – jest to ważne dla utrzymania ciągłości przepływu moczu.
2. Dla utrzymania higieny, ważne jest aby worek do zbiórki nocnej nie leżał na podłodze. W tym wypadku lepiej użyć specjalnego wieszaka.
3. Jeżeli podczas snu stosowane są paski mocujące, należy je poluzować, aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego odłączenia worka.
4. Jeśli w trakcie snu są skłonności do „wiercenia się”, bezpieczniej jest stosować worki z karbowanym drenem, aby zapewnić ciągłość przepływu moczu.
5. Połączenie worka na noc z workiem na nogę zwiększa pojemność systemu i zmniejsza ryzyko infekcji.

Refundacja w nefrostomii

Worki do zbiórki moczu dla pacjentów z nefrostomią są refundowane w 100% do wysokości limitu. Oznacza to, że pacjent ma prawo bezpłatnie odebrać worki do wysokości limitu, który wynosi 120 zł miesięcznie. Worki można odebrać w sklepach medycznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do odbioru zaopatrzenia niezbędne jest zlecenie na Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne wraz z kartą Zaopatrzenia Comiesięcznego (część B zlecenia).

Jakie są warunki refundacji?

W przypadku nefrostomii w ramach kwotowego limitu 120 zł miesięcznie można odebrać do 12 sztuk worków lub, w równoważnej kwocie ich nabycia, inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące, itp).

Co to w praktyce oznacza dla pacjenta?

Pacjent może odebrać do 12 sztuk worków lub w ramach limitu 120 zł inny sprzęt medyczny. Jeżeli worki, które wybrał kosztują dokładnie 10 zł to wszystko odbywa się bezpłatnie. Jeżeli jednak pacjent zdecyduje się odebrać worki droższe to pokrywa różnicę między refundacją NFZ a ceną worka. Jeżeli zdecyduje się odebrać worki w kwocie niższej niż 10 zł to i tak może odebrać tylko maksymalnie 12 sztuk worków, a niewykorzystana kwota przepada. Pacjent może jednak kupić mniej worków, a za pozostałą kwotę odebrać inny sprzęt np. paski do mocowania worków na nodze.

Czy mogę zrealizować wniosek także wtedy, gdy mam nefrostomię czasową?

Niezależnie od czasu na jaki wylaniania jest nefrostomia, wniosek refundacyjny przysługuje każdemu pacjentowi. Pacjent ma prawo skorzystania z dostępu do wyrobów medycznych w ramach istniejących uregulowań prawnych i zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Czy w przypadku obustronnej nefrostomii mam prawo do podwójnego wniosku?

Tak. W przypadku obustronnej nefrostomii pacjentowi przysługuje podwójny limit. W praktyce oznacza to, że pacjent ma do wykorzystania podwójną kwotę na refundację sprzętu medycznego czyli 240 zł miesięcznie. Również karta Zaopatrzenia Comiesięcznego (część B zlecenia) musi być wystawiona na podwójny limit.

Czy mogę zrealizować wniosek 3-miesięczny?

Tak. 3-miesięczne zaopatrzenie oznacza wykorzystanie limitu wartościowego dla 3 miesięcy czyli kwotę 360 zł. W przypadku nefrostomii obustronnej realizacja wniosku 3-miesięcznego oznacza możliwość wykorzystania kwoty w wysokości 720 zł.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Centrum Pacjenta Coloplast




Conveen®

Najważniejsze cechy worków do zbiórki moczu – na co warto zwrócić szczególną uwagę?


Zawór antyzwrotny

Wszystkie worki Conveen posiadają system chroniący przed cofaniem się moczu, bez względu na pozycję ciała.

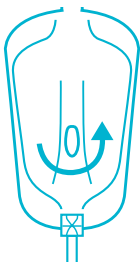

Mięka wyściółka fizeleinowa


Każdy worek Conveen posiada wyściółkę fizeleinową, która chroni skórę przed oparzeniami.

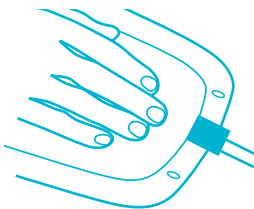

Wygodny zaciskany zawór odpływowy


Worki Conveen do zbiórki moczu na nogę są łatwe do opróżnienia nawet dla osób o niepełnej sprawności manualnej.



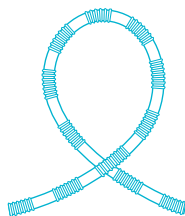


Antyskrętny dren

Antyskrętna budowa drenu gwarantuje ciągłą drożność, dając większe poczucie pewności użytkownikowi.

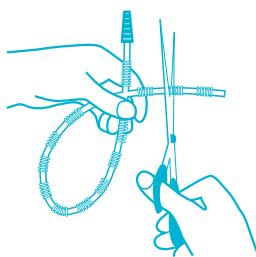

Możliwość docięcia

Specjalna budowa drenu w workach Conveen umożliwia jego docięcie na odpowiednią długość, co ułatwia swobodne poruszanie się.

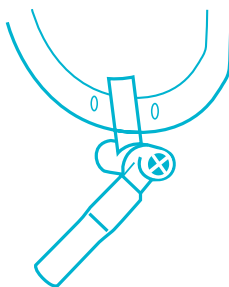

Dwuetapowy zawór odpływowy

Worek do nocnej zbiórki moczu Conveen Security+ posiada nowy zawór odpływowy. Dwuetapowe otwieranie zaworu zapobiega przypadkowemu otwarciu oraz umożliwia kontrolę szybkości wypływu moczu podczas opróżniania worka.

Conveen® Security+

Worek do zbiórki moczu na nogę, 500 ml, z drenem karbowanym 30 lub 50 cm

Worek do zbiórki moczu Conveen Security+ na nogę ma długi i wąski kształt. Zgrzew komór worka został umieszczony niżej, gdyż jest to najbardziej efektywne. Kształt i profil sprawiają, że worek dopasowuje się do ciała bardzo naturalnie, zwłaszcza podczas noszenia na podudziu. Płaski profil zmniejsza odkształcenia i zapewnia dyskrecję. Wykonany z materiału wolnego od PVC.

Dren karbowany

- całkowicie antyskrętny
- optymalne zabezpieczenie swobodnego przepływu moczu
- dren można przycinać na wszystkich gładkich powierzchniach
- worek może być umieszczony wygodnie bez nadmiaru drenu
- gładkie powierzchnie drenu zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii, co minimalizuje ryzyko infekcji

Miękka wyściółka fizelinowa

- wygodna w noszeniu
- pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny

- zapobiega cofaniu się moczu
- zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór odpływowy

- łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną sprawnością manualną
- możliwość opróżnienia worka
- prosty w użyciu, widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty
- „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty



Conveen® Contour

Worek do zbiórki moczu na nogę, 600 lub 800 ml, z gładkim drenem 45 cm

Worek ten jest wyjątkowy, ponieważ posiada wiele komór, dzięki którym jest bardzo dyskretny w noszeniu. Komory równomiernie rozprawdzają wpływający do worka mocz, dzięki czemu worek jest mniej widoczny podczas noszenia. Jego kształt idealnie dopasowuje się do kształtu nogi. Miękką wyściółka fizelinowa pozwala skórze oddychać, dzięki czemu noszenie worka jest wygodne i bezgłośnie w użyciu.

Budowa wielokomorowa

- kształt worka dopasowany do kształtu nogi
- dyskretny i wygodny
- dostępny w dwóch rozmiarach/
pojemnościach: 600 lub 800 ml

Miękką wyściółka fizelinowa

- wygodna w noszeniu
- pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny

- zapobiega cofaniu się moczu
- zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki

- wykonany z bardzo elastycznego materiału, pozwala na swobodę ruchu użytkownika
- dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy przepływ moczu
- dren może być docięty do wymaganej długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór odpływowy

- łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną sprawnością manualną
- możliwość opróżnienia worka
- widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty
- „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty



Conveen® Standard

Worek na nogę lub do nocnej zbiórki moczu, 1500 ml, z gładkim drenem 90 cm

Worek o dużej pojemności, który może być przydatny w nocy oraz w sytuacjach, kiedy częste opróżnianie małego worka może być trudne. Worek można zawiesić na brzegu łóżka lub wózka, ale przystosowany jest również do noszenia na nodze.

Miękka wyściółka fizelinowa

- wygodna w noszeniu
- pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny

- zapobiega cofaniu się moczu
- zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki

- wykonany z bardzo elastycznego materiału, pozwala na swobodę ruchu użytkownika
- dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy przepływ moczu
- dren może być docięty do wymaganej długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór odpływowy

- łatwy w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną sprawnością manualną
- możliwość opróżnienia worka
- widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty
- „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty



Conveen® Security+

Worek do nocnej zbiórki moczu, 2000 ml, z drenem karbowanym 140 cm

Worek o dużej pojemności przeznaczony do zawieszenia przy łóżku. Ze względu na swoje zastosowanie nie posiada wyściółki fizelinowej. Jest dostępny także w wersji sterylnej.

Dren karbowany

- bardzo długi dren karbowany – 140 cm, daje większe bezpieczeństwo i swobodę podczas snu, bez ryzyka skręcenia drenu i zatkania odpływu moczu
- całkowicie antyskrętny
- optymalne zabezpieczenie swobodnego przepływu moczu
- dren można przycinać na wszystkich gładkich powierzchniach
- worek może być umieszczony wygodnie bez nadmiaru drenu
- gładkie powierzchnie drenu zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii, co minimalizuje ryzyko infekcji

Duża pojemność worka

- 2000 ml daje możliwość spokojnego snu w nocy bez konieczności opróżniania worka

Bezpieczny dwufazowy zawór odpływowy

- dwuetapowe otwieranie zaworu zapobiega przypadkowemu otwarciu oraz umożliwia kontrolę szybkości wypływu moczu podczas opróżniania worka

Zawór antyzwrotny

- zapobiega cofaniu się moczu
- zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji



Akcesoria

Paski mocujące

W oferowanym asortymencie akcesoriów znaleźć można dwa rodzaje pasków mocujących przeznaczonych do umieszczenia worka do zbiórki moczu na nodze. O wyborze pasków każdy użytkownik może zdecydować sam wedle własnych potrzeb i wygody. Oba rodzaje pasków wykonane są z poliestru z rozciągliwym nylonem pozwalającym na niezakłócone krążenie krwi i wygodę w noszeniu. Oba rodzaje pasków nie zawierają lateksu, są wielokrotnego użytku, można je prać oraz docinać.

1. Paski mocujące Conveen z guzikami – guziki należy wpiąć w oczka worka do zbiórki moczu na nogę.
2. W celu zamocowania worka paski mocujące Conveen należy przewlec przez oczka w worku do zbiórki moczu. Zaletą tych pasków są dodatkowe paski silikonowe umieszczone po ich wewnętrznej stronie. Zapobiegają one ewentualnemu ślizganiu i zsuwaniu się pasków z nogi.



Wieszak do worków

Wieszak może być zastosowany w celu wygodnego zawieszenia worka do nocnej zbiórki moczu przy łóżku, wózku inwalidzkim lub na ścianie.



Worki do zbiórki moczu refundowane w nefrostomii

	nazwa	pojemność / dł. drenu	ilość w opako- waniu	refundacja w limicie nefrostomijnym	numer katalogowy
	Conveen work do zbiórki nocnej z gładkim drenem	1,5 l / 90 cm	10	TAK	050620
	Conveen Security+ work na nogę z karbowanym drenem	0,5 l / 30 cm	10	TAK	051600
		0,5 l / 50 cm	10	TAK	051610
	Conveen work konturowy z gładkim drenem	0,6 l / 45 cm	10	TAK	051700
		0,8 l / 45 cm	10	TAK	051740
	Conveen Security+ work do zbiórki nocnej z karbowanym drenem	2,0 l / 140 cm	10	TAK	213460
	Conveen Security+ Sterylny work do zbiórki nocnej z karbowanym drenem	2,0 l / 140 cm	10	TAK	213560

Akcesoria

	nazwa	opakowanie	ilość w opako- waniu	refundacja w limicie nefrostomijnym	numer katalogowy
	Paski mocujące Conveen z guzikami	1 kpl.	10	TAK	050500
	Paski mocujące Conveen z dodatkowym paskiem silikonowym	1 kpl.	10	TAK	021380
	Wieszak do worków	1 szt.	10	TAK	050700
	Conveen Prep	1 saszetka	54	NIE	0620420

Pozostałe produkty urologiczne

Coloplast

Freedom Clear Advantage – cewnik zewnętrzny silikonowy

	nazwa	rozmiar (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	Freedom Cewnik zewnętrzny samoprzylepny (1-częściowy)	Ø 23	30	5043101002
		Ø 28	30	5043301002
		Ø 31	30	5043401002
		Ø 35	30	5043501002
		Ø 40	30	5043601002



Conveen – cewnik zewnętrzny lateksowy

	nazwa	rozmiar (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	Conveen Cewnik zewnętrzny z hydrokoloidowym przylepcem (2-częściowy)	Ø 20	30	051200
		Ø 25	30	051250
		Ø 30	30	051300
		Ø 35	30	051350
		Ø 40	30	051400
	Conveen Cewnik zewnętrzny samoprzylepny (1-częściowy)	Ø 20	30	052120
		Ø 25	30	052000
		Ø 30	30	052050
		Ø 35	30	052100
		Ø 40	30	052150


Conveen Security+ – cewnik zewnętrzny nialateksowy

	nazwa	rozmiar (mm)	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	Conveen Security+ Cewnik zewnętrzny z hydrokoloidowym przylepcem (2-częściowy)	Ø 25	30	050250
		Ø 30	30	050300
		Ø 35	30	050350
	Conveen Security+ Cewnik zewnętrzny samoprzylepny (1-częściowy)	Ø 21	30	052210
		Ø 25	30	052250
		Ø 30	30	052300
		Ø 35	30	052350
	Conveen Security+ super Cewnik zewnętrzny samoprzylepny z krótką koszulką (1-częściowy)	Ø 25	30	220120
		Ø 30	30	220130
		Ø 35	30	220140

SpeediCath – jednorazowe hydrofilowe powlekane cewniki urologiczne gotowe do natychmiastowego użycia

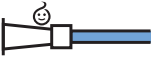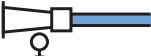	nazwa	rozmiar	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	SpeediCath Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny Nelaton Dziecięcy	CH06 / 2,0 mm	30	287060
		CH08 / 2,7 mm	30	287080
		CH10 / 3,3 mm	30	287100
	SpeediCath Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny Nelaton dla Chłopców	CH06 / 2,0 mm	30	286060
		CH08 / 2,7 mm	30	286080
		CH10 / 3,3 mm	30	286100
		CH12 / 4,0 mm	30	286120
	SpeediCath Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny Nelaton dla Kobiet	CH06 / 2,0 mm	30	285060
		CH08 / 2,7 mm	30	285080
		CH10 / 3,3 mm	30	285100
		CH12 / 4,0 mm	30	285120
		CH14 / 4,7 mm	30	285140
	SpeediCath Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny Nelaton dla Mężczyzn	CH16 / 5,3 mm	30	285160
		CH08 / 2,7 mm	30	284080
		CH10 / 3,3 mm	30	284100
		CH12 / 4,0 mm	30	284120
		CH14 / 4,7 mm	30	284140
		CH16 / 5,3 mm	30	284160
	SpeediCath Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny Tiemann dla Mężczyzn	CH18 / 6,0 mm	30	284180
		CH10 / 3,3 mm	30	284900
		CH12 / 4,0 mm	30	284920
		CH14 / 4,7 mm	30	284940

EasiCath – jednorazowe hydrofilowe powlekane cewniki urologiczne

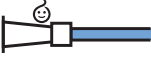	nazwa	rozmiar	ilość w opakowaniu	numer katalogowy
	EasiCath Jednorazowy cewnik powlekany Nelaton Dziecięcy	CH 8 / 2,7 mm	25	050080
		CH 10 / 3,3 mm	25	050100
	EasiCath Jednorazowy cewnik powlekany Nelaton dla Mężczyzn	CH 10 / 3,3 mm	25	053500
		CH 12 / 4,0 mm	25	053520
		CH 14 / 4,7 mm	25	053540
	EasiCath Jednorazowy cewnik powlekany Nelaton dla Kobiet	CH 10 / 3,3 mm	25	053700
		CH 12 / 4,0 mm	25	053720
		CH 14 / 4,7 mm	25	053740

Wszystko zaczęło się w 1954 r. Pielęgniarka Elise Sorensen przeżyła się dramatycznymi zmianami w życiu swojej siostry wynikającymi z operacji wyłonienia stomii. Thora nie miała odwagi wyjść z domu w obawie przed wyciekami ze stomii w miejscu publicznym. Elise zdecydowała się pomóc siostrze wyjść ze społecznej izolacji. Jej pomysł to worek stomijny z przylepcem, który miał dokładnie przylegać do skóry. Miał on zapewnić szczelność i dać siostrze, podobnie jak tysiącom ludzi w tej samej sytuacji, szansę powrotu do normalnego życia.

Proste rozwiązanie o wielkim znaczeniu.

Dzisiaj nasza działalność obejmuje opiekę stomijną, opiekę urologiczną oraz opiekę nad pacjentem z ranami trudno gojącymi się. We wszystkich tych sferach prowadzi nas pasja i zaangażowanie Elise. Tak jak ona pracujemy blisko pacjentów. Słuchamy ich potrzeb i reagujemy poprzez dostarczanie produktów i usług, by ich życie czynić łatwiejszym.



Jeżeli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast: 800 269 579.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając około 10 000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 01/2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.



Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel. (22) 535 60 00
fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl