

EasiCath®

Telefoniczne
Centrum
Pacjenta
Coloplast
800 269 579

EasiCath

Łatwiejsze samocewnikowanie każdego dnia



Bezpieczeństwo

Cewniki EasiCath są bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem w przypadkach dysfunkcji w oddawaniu moczu. EasiCath jest cewnikiem posiadającym powlekane otwory drenażowe, co w jeszcze większym stopniu zmniejsza tarcie i redukuje ryzyko urazów cewki moczowej zarówno w czasie wprowadzania jak też podczas jego wyjmowania. Powlekana powierzchnia cewnika zapewnia minimalne tarcie i redukuje ryzyko urazów długoterminowych.

Komfort

EasiCath jest łatwy w użyciu. Poprzez zanurzenie w wodzie na 30 sekund aktywuje się specjalną powłokę, która czyni cewnik tak gładkim, że ledwie można go wyczuć po włożeniu do cewki moczowej. Jeśli jesteś daleko od toalety, cewnik EasiCath można również połączyć z workiem do zbiórki moczu.

Czyste cewnikowanie przerywane **CIC (Clean Intermittent Catheterisation)** zwane także **samocewnikowaniem** uznawane jest za najlepszą metodę opróżniania pęcherza. Stosowanie jej znacznie obniża ryzyko występowania infekcji dróg moczowych, a tym samym zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerek.

EasiCath - cewnik jednorazowy powlekany

symbol	nazwa	kod	rozmiar
	Cewnik jednorazowy powlekany Nelaton Dziecięcy	5008 5010	CH 8 CH 10
	Cewnik jednorazowy powlekany Nelaton dla Mężczyzn	5350 5352 5354	CH 10 CH 12 CH 14
	Cewnik jednorazowy powlekany Nelaton dla Kobiet	5370 5372 5374	CH 10 CH 12 CH 14

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Dostarczamy nasze rozwiązania osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz z ranami trudnogojącymi. Pracujemy na całym świecie zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 05/2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

Coloplast

Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel. (22) 535 60 00
fax (22) 535 60 74


www.coloplast.pl

EasiCath


Łatwiejsze samocewnikowanie każdego dnia

Budowa i zasada działania cewnika EasiCath

Cewnik EasiCath jest przeznaczony do czystego cewnikowania przerywanego **CIC (Clean Intermittent Catheterisation)** bez użycia dodatkowego żelu zarówno dla mężczyzn, kobiet, jak i dzieci.

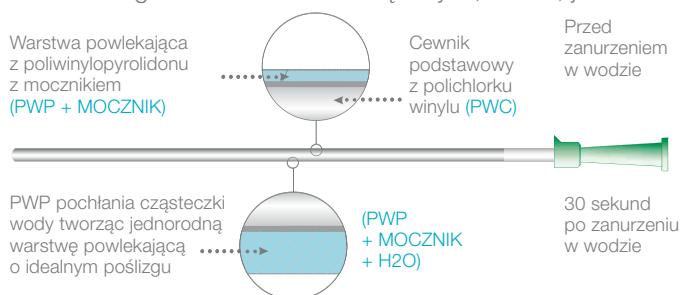

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii cewnik EasiCath został pokryty jednorodną warstwą powlekającą, która umożliwia bezpieczne używanie cewnika **bez dodatkowego żelu**. Warstwa powlekająca składa się z poliwinylpyrolidonu i mocznika.

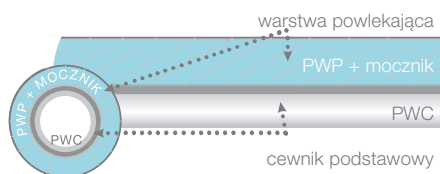

Poliwinylpyrolidon (PWP) jest polimerem hydrofilowym, który aktywuje się, gdy wchodzi w kontakt z wodą (H₂O) lub płynem fizjologicznym uzyskując gładkość o niskim współczynniku tarcia.

Mocznik jest substancją naturalną występującą w organizmie ludzkim. Ma właściwości nawilżające i przyczynia się do zmiękczenia powierzchni, na które jest nakładany. Po 30 sekundach od zanurzenia w wodzie warstwa powlekająca cewnika EasiCath przekształca się w jednorodny żel umożliwiający delikatne i bezpieczne wprowadzenie go do cewki moczowej.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Dostarczamy nasze rozwiązania osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz z ranami trudnogojącymi. Pracujemy na całym świecie zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 05/2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.


EasiCath – jednorodna warstwa powlekająca – gładkość i poślizg

Widok mikroskopowy

Cewnik tradycyjny



Cewnik powlekany EasiCath

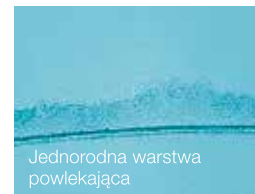

Jednorodna warstwa powlekająca EasiCath zmniejsza tarcie pomiędzy cewnikiem a błoną śluzową cewki moczowej i umożliwia łatwe i bezpieczne wprowadzenie cewnika bez dodatkowego żelu.

Porównanie współczynnika tarcia pomiędzy cewnikiem a błoną śluzową cewki moczowej*



Źródło:

- Hedlund et al, 2001, Scandinavian Journal of Urol Nephrology 35, p. 49-53
- Vaidyanathan et al, 1994, Paraplegia 32, p. 493-500
- Biering-Sorensen et al, 1999, International Medical Society of Paraplegia