

Doskonałe dopasowanie. Wyjątkowy komfort.





„Jest wszystkim,
czego potrzebuję.
Jest cienki
i elastyczny.”

Amy, osoba ze stomią

„Kolor jest
nowoczesny
i dyskretny.”

Heidi, pielęgniarka



Zachowaj bezpieczeństwo i pewność przez cały dzień

Z nowym sprzętem SenSura Mio® nie musisz martwić się o bezpieczeństwo lub o widoczność Twojego worka.

Nowa SenSura Mio posiada elastyczny przylepiec, który zapewnia bezpieczne przyleganie do ciała nawet, gdy się schylasz i rozciągasz.

Ma on również nowy wzór, który czyni go bardzo dyskretnym i daje mu bardziej osobisty wygląd i charakter.

Z nowym sprzętem SenSura Mio możesz poruszać się z pewnością siebie w każdej sytuacji.



Technologia BodyFit®

Nowa SenSura Mio oparta jest na naszym podejściu nazywanym innowacją skupioną na człowieku. Projektujemy z myślą o różnych ciałach. Opracowujemy rozwiązania, które bezpiecznie dopasowują się do indywidualnych kształtów ciała i stylów życia.



Doskonałe dopasowanie

Aby czuć się pewnie i w pełni korzystać z życia




1.

Elastyczny przylepiec dopasowuje się do Twojego indywidualnego kształtu ciała i podąża za jego ruchami, kiedy się schylasz.



2.

Rozciąga się i podąża za skórą, kiedy się rozciągasz.

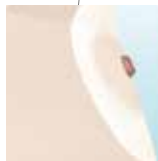

3.

Wraca do pierwotnego położenia, kiedy stoisz.



Wyjątkowy komfort

Aby być pewnym siebie w towarzystwie



4.

Nie musisz martwić się, że Twój sprzęt będzie widoczny. Worek i filtr zaprojektowano dla optymalnej dyskrecji, więc możesz prowadzić życie towarzyskie bez obaw.



Pasuje do indywidualnych kształtów ciała

Nie ma dwóch takich samych ciał. Ludzie mają różne ciała, a kształt ich brzucha zmienia się zarówno w trakcie dnia, jak i wtedy, kiedy się poruszają.

Elastyczny przylepiec dostosowuje się do Ciebie – zgina się i rozciąga w odpowiedzi na zmiany kształtu Twojego ciała.


Zapewnia bezpieczne przyleganie nawet w przypadku przepuklin, blizn i fałdów skórnych.



Pozostaje dyskretny niezależnie od ubioru

Neutralny kolor został wybrany specjalnie – jego celem jest bycie niezauważonym pod wszystkimi kolorami ubioru – nawet pod białym.

Gładki materiał, wykonany w całości z tkaniny sprawia, że sprzęt staje się częścią garderoby lub dodatku do ubioru.

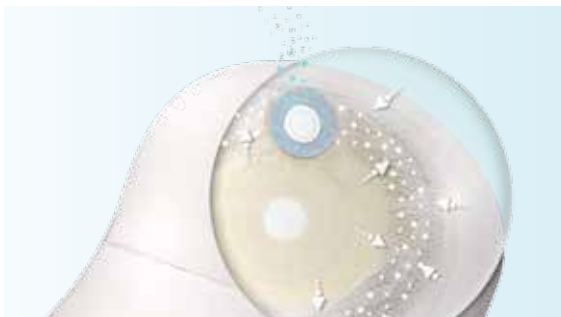

Ogranicza balonowanie

Unikalny filtr wstępny zapewnia większą ochronę przed zatykaniem. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko balonowania o 61%.



Nowe łączenie Click w sprzęcie 2-częściowym

Nowe łączenie Click posiada unikalny zamek w kształcie pierścienia, zaprojektowany, aby dawać poczucie pewności i bezpieczeństwa. Słyszalne „kliknięcie” potwierdza bezpieczne przypięcie worka do płytki. Zanim worek zostanie zablokowany, można obracać go do osiągnięcia pożądanej pozycji.

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 1-częściowy dla kolostomii i ileostomii

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezro- czysty	neutralny szary
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Mini	15-45	120	-	108700
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Midi	15-45	440	-	108710
	SenSura Mio, worek zamknięty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	15-45	570	-	108810
	SenSura Mio, worek zamknięty, przezroczysty, filtr okrągły 430, Maxi	15-55	520	108910	-

Worki SenSura Mio otwarte – sprzęt 1-częściowy

	SenSura Mio, worek otwarty, z okienkiem, neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	-	104510
	SenSura Mio, worek otwarty, z ujściem Hide-away®, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	10-55	510	104580	104560

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla kolostomii

Worki SenSura Mio zamknięte – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezro- czysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	40	595	114030	114020
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	50	515	114140	114130
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	60	530	114230	114220
	SenSura Mio Click, worek zamknięty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	70	490	114260	114250

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla ileostomii

Worki SenSura Mio Click otwarte – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezro- czysty	neutralny szary
	SenSura Mio Click, worek otwarty, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	40	550	114330	114340
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	50	550	114440	114430
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	60	495	114530	114520
	SenSura Mio Click, worek otwarty, z okienkiem, przezroczysty lub neutralny szary, filtr okrągły 430, Maxi	70	455	114570	114560

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt urostomijny

Worki SenSura Mio urostomijne – sprzęt 1-częściowy

	nazwa	max. otwór / rozmiar stomii (mm)	pojemność (ml)	numer katalogowy	
				przezro- czysty	neutralny szary
	SenSura Mio worek urostomijny, neutralny szary, Midi	10-45	350	-	105810
	SenSura Mio worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	10-45	460	105860	105820

Worki SenSura Mio Click urostomijne – sprzęt 2-częściowy

	SenSura Mio Click, worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	40	510	114920	114910
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, neutralny szary, Midi	50	400	-	114960
	SenSura Mio Click, worek urostomijny, przezroczysty lub neutralny szary, Maxi	50	487,5	114980	114970

Asortyment SenSura® Mio – Sprzęt stomijny 2-częściowy dla kolostomii, ileostomii i urostomii

Płytki stomijne SenSura Mio Click – sprzęt 2-częściowy

	nazwa	rozmiar (mm) kryza/otwór	numer katalogowy
	SenSura Mio Płytką stomijną Click, z uszkami do paska	40, 10-35	105020
		50, 10-45	105120
		60, 10-55	105220
		70, 10-65	105310

Paski mocujące Brava

	nazwa	rozmiar	numer katalogowy
	Brava Pasek mocujący do SenSura Mio z czterema zaczepami	Standard	004230
		XXL	004240

Nowy sprzęt SenSura[®] Mio

Dla kolostomii, ileostomii i urostomii



Sprzęt jednoczęściowy



Sprzęt dwuczęściowy

Zobacz różnicę

Obejrzyj nasz film online na stronie sensuramio.coloplast.pl, aby zobaczyć reakcje innych osób na nowy sprzęt SenSura Mio.

Wypróbuj i poczuj różnicę – zadzwoń: **Telefoniczne Centrum Pacjenta 800 269 579** (numer bezpłatny) lub zarejestruj się na stronie sensuramio.coloplast.pl.

