

SpeediCath®



SpeediCath®

Cewnik gotowy do natychmiastowego użycia





Co to jest cewnikowanie przerywane?

Stosowanie cewnika w celu opróżnienia pęcherza moczowego

Cewnikowanie przerywane to proces regularnego stosowania cewnika jednorazowego w celu opróżniania pęcherza moczowego.

Istnieje szereg przyczyn, które powodują, że niektóre osoby nie mogą oddać moczu bez pomocy cewnika. Może to być spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego, może być skutkiem problemów dotyczących kręgosłupa lub wiązać się z wrodzonym schorzeniem.

Niezależnie od przyczyny, jeśli mocz pozostaje zbyt długo w pęcherzu, istnieje ryzyko, że ulegnie tam niekorzystnym zmianom. Może to sprzyjać namnażaniu się bakterii i prowadzić do zakażenia układu moczowego, a nawet uszkodzenia nerek.



Pęcherz moczowy należy opróżniać tak często, jak przy prawidłowo funkcjonującym pęcherzu moczowym (4-6 razy dziennie), stosując cewnikowanie przerywane. SpeediCath® umożliwia opróżnianie pęcherza w momencie najbardziej odpowiednim dla danej osoby i jej trybu życia.

Niniejsza ulotka została zaprojektowana tak, aby odpowiedzieć na niektóre z najczęstszych pytań, jakie zadaje użytkownik oraz aby pomóc wprowadzić procedurę cewnikowania do codziennej praktyki.

Układ moczowy

Układ moczowy składa się z dwóch nerek, dwóch moczowodów, pęcherza moczowego, zwieracza i cewki moczowej. Zadaniem nerek jest filtrowanie krwi, aby usunąć z niej produkty przemiany materii. W tym celu powstaje mocz. Mocz odpływa z nerek do pęcherza moczowego, gdzie jest przechowywany.

Mocz musi być usuwany przez cewkę moczową 4-6 razy dziennie lub z częstotnością zalecaną przez lekarza i pielęgniarkę. Jeśli pęcherz moczowy nie będzie opróżniany wystarczająco często, mocz ulegnie niekorzystnym zmianom. Bakterie w pęcherzu moczowym zaczną się mnożyć, co może prowadzić do zakażenia dróg moczowych.

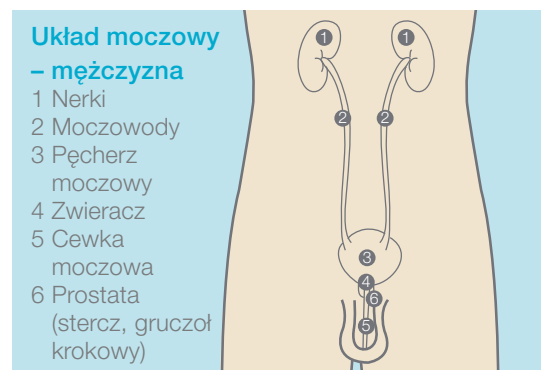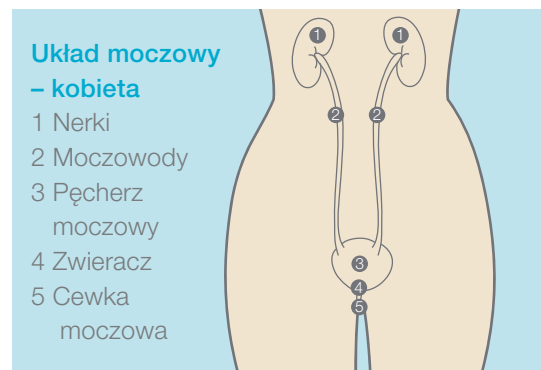

SpeediCath® wyznacza standard

SpeediCath odróżnia się od innych cewników. Po wyjęciu z opakowania jest gotowy do natychmiastowego użycia, bez konieczności dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej), co umożliwia opróżnianie pęcherza moczowego w momencie dogodnym dla pacjenta. Dowiedziono, że jest to niezawodny wybór.

Korzyści ze stosowania SpeediCath:

- Gotowy do natychmiastowego użycia i łatwy w stosowaniu
- Minimalizuje ryzyko zakażeń układu moczowego
- Gładki i wygodny w stosowaniu
- Preferowany przez użytkowników



Wygodny

Gotowy do natychmiastowego użycia

SpeediCath® jest gotowy do natychmiastowego użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Dzięki unikalnej hydrofilowej powłoce działa bez potrzeby dodawania wody lub substancji nawilżającej (poślizgowej). Nie istnieje szybsze lub prostsze rozwiązanie.

Łatwy w stosowaniu

SpeediCath jest zarówno szybki, jak i łatwy w stosowaniu. Zamieszczone na opakowaniu okrągłe uszko ułatwia jego otwieranie, a elementy mocujące zapewniają, że cewnik pozostanie na miejscu. Ponadto SpeediCath można w razie potrzeby w łatwy sposób połączyć z workiem do zbiórki moczu.



Bezpieczny

Dowodzono, że minimalizuje ryzyko infekcji układu moczowego

Dowodzono, że SpeediCath® znamienne zmniejsza ryzyko zakażenia układu moczowego w porównaniu do cewników niepowlekanych oraz innych cewników z powłoką hydrofilową.^{2,3}

Gładki i wygodny w użyciu

Cewniki SpeediCath posiadają unikalną opatentowaną hydrofilową powłokę, która powoduje, że powierzchnia cewnika jest bardzo gładka i zapewnia wygodne wprowadzenie cewnika oraz łagodne jego usunięcie z pęcherza, wymagające niewielkiej siły tarcia.⁴

SpeediCath posiada także wypolerowane oczka, które powodują, że powierzchnia cewnika jest gładka, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia cewki moczowej.^{2,3}

SpeediCath nie zawiera PVC i ftalanów, dzięki czemu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia użytkowników.



SpeediCath® preferowany przez użytkowników


SpeediCath jest zdecydowanie najczęściej sprzedawanym cewnikiem w Europie¹. Rzeczywiście, użytkownicy preferują SpeediCath w porównaniu z tradycyjnymi, cewnikami niepowlekanymi.²⁻⁵

Cewnik SpeediCath jest preferowany, ponieważ:

- Jest wygodny
- Jest łatwy w stosowaniu
- Jest dyskretny
- Jest szybki w użyciu



Jak stosować SpeediCath®

 Przed użyciem zawsze należy zapoznać się z dokumentem „Instrukcja użytkowania”, która znajduje się w opakowaniu produktu.

Kobiety

1. Należy delikatnie rozchylić wargi sromowe, aby uwidocznić ujście cewki moczowej. Następnie przemyć okolicę sromu, kierując się od przodu ku tyłowi, aby nie przenosić bakterii z odbytu w okolice ujścia cewki moczowej, gdyż może to wywołać zakażenie.
2. Należy delikatnie wprowadzić cewnik do cewki moczowej. Kontynuować wprowadzanie cewnika do pęcherza moczowego, aż zacznie wypływać mocz.

Mężczyźni

1. Należy delikatnie odciągnąć napletek i umyć żołądź penisa. W trakcie mycia wykonywać ruch na zewnątrz, rozpoczynając od ujścia cewki moczowej.
2. Należy unieść penis, aby wyprostować cewkę moczową. Delikatnie ucisnąć główkę penisa, aby otworzyć ujście cewki moczowej. Delikatnie wprowadzić cewnik do cewki moczowej. Naturalne jest wyczuwanie pewnego oporu, gdy cewnik dochodzi do zwieracza lub gruczołu krokowego (prostaty, stercza). Należy kontynuować wprowadzanie cewnika do pęcherza moczowego, aż zacznie wypływać mocz.



Pytania i odpowiedzi

1 Jak często należy wykonywać cewnikowanie?

Okolo 4-6 razy dziennie lub z częstością zalecaną przez lekarza lub pielęgniarkę. Należy wykonywać cewnikowanie z taką samą częstością, jak przy prawidłowo funkcjonującym pęcherzu moczowym.

2 Jaki rozmiar cewnika należy stosować?

Ważne jest, aby stosować właściwy cewnik i właściwy rozmiar. Personel medyczny pomoże dobrać właściwy cewnik.

3 Jakie należy podjąć kroki, gdy nie jest możliwe wprowadzenie cewnika?

W przypadku niepowodzenia nie należy denerwować się lub wpadać w panikę. Należy się rozluźnić i odczekać kilka minut przed podjęciem kolejnej próby cewnikowania. Korzystna może być ciepła kąpiel. Jeśli problem z wprowadzeniem cewnika powtarza się, należy skontaktować się z personelem medycznym.

4 Ile płynów należy wypijać w ciągu dnia?

Należy wypijać okolo 1,5-2 litry płynów dziennie. Kolor moczu pomoże ustalić, czy wypijana ilość płynów jest właściwa. Jeśli użytkownik pije odpowiednią ilość płynów, kolor moczu będzie jasny.

5 Jak ma postępować pacjent, który dużo podróżuje?

Cewniki SpeediCath® nie są dostępne we wszystkich regionach lub krajach, a nawet

jeśli są, użytkownik wolałby nie trzyszczyć się o receptę od lekarza, gdy jest z dala od domu. Należy zabrać ze sobą tyle cewników, ile wymaga tego czas trwania podróży. Aby uniknąć problemów celnych, można poprosić lekarza o pisemne potwierdzenie, że cewniki są pacjentowi potrzebne z powodów medycznych i że przeznaczone są do jego osobistego użytku.

6 Czy są jakieś objawy, które mogą zaniepokoić?

Tak, jeśli użytkownik zauważy któryś z niżej wymienionych objawów, powinien skontaktować się z osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia: jeśli mocz jest mętny, ciemno zabarwiony, ma nieprzyjemny zapach, jeśli wystąpi uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu lub cewnikowaniu lub jeśli potrzeba oddania moczu występuje częściej i jest nagląca. Podobnie, jeśli wystąpi gorączka, może to być objaw infekcji i należy wówczas zwrócić się o poradę do lekarza.

7 Jak należy postępować, gdy nie jest możliwe wyjęcie cewnika?

Jest to rzadka sytuacja, ale jeśli się wydarzy, należy zachować spokój. Należy się rozluźnić i po 5-10 minutach podjąć następną próbę wyjęcia cewnika. Kaszel często pomaga rozluźnić mięśnie, co ułatwia wyjęcie cewnika.

Szczegółowe informacje o produkcji

Rodzina cewników SpeediCath®.



SpeediCath® – gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny

Rozmiar	Męski	Męski	Kobięcy	Dla chłopców	Dziecięcy
	Nelaton	Tiemann			
CH 06			285060	286060	287060
CH 08	284080		285080	286080	287080
CH 10	284100	284900	285100	286100	287100
CH 12	284120	284920	285120	286120	
CH 14	284140	284940	285140		
CH 16	284160		285160		
CH 18	284180				

Piśmiennictwo:

1. SpeediCath is the most sold catheter brand in Europe. Coloplast sales data, GERS, IMS, Assobiomedica, Nefemed, PCA, 2012/13
2. Cardenas et al.: Intermittent catheterization with a hydrophilic-coated catheter delays the occurrence of urinary tract infection in patients with acute spinal cord injury: A prospective, randomized, parallel, multi-centre trial. PM R 2011; 3:408-417.
3. De Ridder DJMK et al.: Intermittent catheterisation with hydrophilic coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of urinary tract infection in spinal cord injured patients: A prospective randomized parallel comparative trial. European Urology 2005 Vol. 48 (6), p 991-995.
4. Stensballe J. et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters. European Urology 2005, Vol. 48 (6) p. 978-983.
5. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001; 10:325 -329.

Coloplast opracowuje produkty i usługi, które ułatwiają funkcjonowanie ludziom cierpiącym na choroby o bardzo osobistej i intymnej naturze. Dzięki ścisłej współpracy z użytkownikami naszych produktów tworzymy rozwiązania, które są dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną.

Nasza działalność obejmuje pielęgnację stomii, opiekę w urologii i nietrzymaniu moczu oraz pielęgnację skóry i ran. Działamy globalnie i zatrudniamy ponad 8000 osób.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając blisko 8000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 10/2014.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.



Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel. (22) 535 60 00
fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl